



BureTM

Gehwagen

Liebe Benutzer

Gratulation! Sie haben einen Bure Gehwagen erworben. In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie wichtige Informationen, wie Sie den Bure Gehwagen verwenden und wie er gepflegt wird.

Wir von GATE Rehab Development wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt. Melden Sie sich gerne, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder Kommentare haben. Rufen Sie +46 371 318 00 an.

Erhöhen und absenken des Rahmens

Stellen Sie die Höhe durch Öffnen der Feststellhebel auf beiden Seiten ein (2 stück). Heben oder senken Sie auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie danach die Feststellhebel an (2 stück).




Einstellung der Handgriffe

Die Handgriffe werden in der gewünschten Position eingestellt, durch: Öffnen des Handrads, Einstellung der Handgriffe, Anziehen des Handrads.



Rechts- und Linkseinstellung der Armstützplatten

Für optimales Stützen können die Armstützplatten seitlich eingestellt werden: Öffnen des Handrads, Einstellung der Position der Armstützplatten, Anziehen des Handrads.

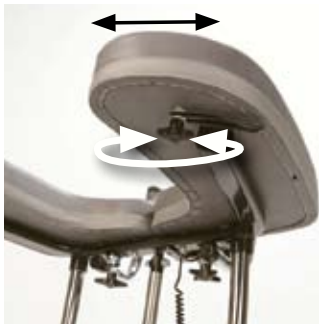

Blockieren der Räder

Die Räder werden durch Drücken der Fußbremse blockiert.



Lösen der Räder

Drücken Sie das hervorstehende Teil der Bremse, um die Bremse zu lösen.



Wartung

Wird mindestens einmal im Jahr empfohlen.

Kontrollieren Sie, dass/ob	Maßnahme
Allgemeines Der Wagen fühlt sich stabil/spielfrei an. Keine Klappergeräusche beim Manövrieren des Wagens. Der Wagen steht gerade und alle Räder sind im Kontakt mit dem Boden. Der Wagen ist nicht schmutzig.	Reinigen Sie mit lauwarmer Seifenlauge/ Oberflächendesinfektionsmittel- (keine Petroleumprodukte).
Armstützplatten Die Armstützplatten sind ganz und sauber. Die Verbreiterung der Armstützplatten funktioniert.	Reinigen und Austauschen im Falle eines Schadens. Sperräder/Unterlegscheiben ergänzen.
Handgriff Die Griffe sind nicht beschädigt/ schmutzig. Die Handgriffeinstellung funktioniert.	Reinigen Sie mit lauwarmer Seifenlauge (keine Petroleum- produkte). Handgriffe austauschen. Sperräder/Unterlegscheiben ergänzen.
Höheneinstellung Erhöhen und Absenken funktioniert. Der Wagen ist stabil bei der Maximaleinstellung. IKein vertikales Spiel zwischen oberem und unterm Stativ. Klemmen für Höheneinstellung schließen.	Steuerbüchse (im Rahmen) oder Endstopper (im verchromten Rohr) evtl. tauschen. Verschlusschrauben anziehen. Fetten Sie das Innengewinde der Feststellschrauben mit Schmierfett o. Ä. oder tauschen Sie die Klemmen aus.
Stativteile Keine mechanische Schäden. Keine Kratzer. Endschutz/unterer Rahmen ist angebracht.	Treten Schäden auf, bitte den GATE Kundendienst kontaktieren. Ausbesserungsfarbe auftragen. Mit neuem Endschutz vervollständigen.
Rad/Bremse Das Rad rollt leicht / Reifenprofil ist nicht beschädigt. Die Räder sind im unteren Stativ fest angezogen. Die Blockierbremse funktioniert an allen Rädern. Die Handbremse funktioniert.	Rad reinigen oder evtl. austauschen (ACHTUNG! Die Räder werden immer chemisch oder mit Kontermutter gesichert.) Die Räder sind eingekap selt; wir raten davon ab, diese zu zerlegen. Tauschen Sie stattdessen das gesamte Radpaket aus. Radschrauben anziehen – ergänzen mit Kontermutter oder chemischer Sicherung (modellabhängig). Radpaket austauschen. Bremse einstellen oder mit neuem Rad ergänzen.


Allgemeine Pflegehinweise

- Wischen Sie bei Bedarf den Gehwagen und die Armstützplatten ab – verwenden Sie dafür Seifenlauge/Oberflächendesinfektionsmittel.
- Das Produkt kann in einer Waschstraße oder Ähnlichem gereinigt werden, da die Elektronik IP65-Klassifizierung entspricht. Das Produkt ist dennoch nicht rostfrei, weswegen eine maschinelle Reinigung seine Lebenszeit einschränken kann.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus – sollte durch kompetentes Personal geschehen.
- Das Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Technische Spezifikationen

Die Maße sind für Wägen mit 125 mm Räder angegeben.

Standard Manuell	S Manuell
Art. Nr. 56-310	Art. Nr. 56-300
Breite 78 cm	Breite 66 cm
Maximales Benutzergewicht 150 kg	Maximales Benutzergewicht 150 kg
Länge 80 cm	Länge 79 cm
Höhe 90-133 cm	Höhe 90-133 cm
Armlehne /Innenmaß 25-50 cm	Armlehne /Innenmaß 30-45 cm

 CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.
Getestet und genehmigt nach EN-11199-3/ 2005



REHAB DEVELOPMENT AB

WE DO BETTER.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter:
Tel.: +46 371 318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele
info@gaterd.com | www.gaterd.com



GATE COLLECTION